

Användarhandledning

Behandlingsstol Cecilia Test & Ear

120-00112-00 & 120-00113-00



Innehållsförteckning

1.	Behandlingsstol Cecilia.....	3
2.	Viktigt - Före användning	3
3.	Installation	4
4.	Att använda Cecilai stolen	6
4.1	Att ställa in armstöden.....	7
4.2	Ställa in rätt sittposition	7
4.3	Att justera höjd på stolen.....	7
4.4	Att justera djup på ryggstödet	7
4.5	Att justera ryggstödet höjd.....	8
4.6	Att justera nackstödet position	8
5.	Rengöring och underhåll.....	9
5.1	Patientnära delar	9
5.2	Periodisk rengöring	9
5.3	Desinficering	9
6.	Underhåll och service.....	10
7.	Tillbehör.....	10
7.1	Hjul.....	11
7.2	Gaskolv	11
7.3	Fotstöd	12
8.	Säkerhet.....	13
9.	Teknisk specifikation.....	13
9.1	Destruktion och återvinning.....	14
10.	Garanti	14

1. Behandlingsstol Cecilia

Tack för att ni har valt en Cecilia behandlingsstol.

Stolen är utvecklad för att erbjuda bästa möjliga komfort, ergonomi, styrka och praktisk design för att möta kraven i det dagliga arbetet. Både patient och operatör har varit fokus i samband med utvecklingen.

Stolen finns i två varianter vilka är specialdesignade för undersökning och behandling. Stolen är konstruerad för funktion och ergonomi. Stolarna är klädda i galon och är utrustade med glidknappar.

Provtagningsstolen Cecilia Test är utrustad med de enkelt inställbara provtagningsarmstöden QuickTight.

Öronundersökningsstolen Cecilia Ear är utrustad med nackstöd, vilket är ställbart i både höjd och djup.

Rini utvecklar ständigt befintliga och nya produkter. Vi sätter alltid användaren i centrum och värdesätter synpunkter och idéer som för vår utveckling framåt. Så tveka inte att låta oss veta vad ni tycker om våra produkter.

2. Viktigt - Före användning



För personal och patientsäkerheten och livslängden hos produkten är det viktigt att ta del av följande instruktioner innan användning. Vänligen läs denna manual noga och sätt er in i hur produkten ska användas innan den tas i bruk.

Innan produkten packas upp ur sitt emballage, kontrollera att:

Inga transportskador finns på emballaget. Om så finns ska det omedelbart dokumenteras med foto och rapporteras till transportbolaget samt Rini eller vår lokala återförsäljare.

Uppackning av emballage

Lyft delarna ur förpackningen

- 1 st. sits
- 1 st. rygg
- 1 st. gaskolv
- 1 st. kryss
- 2 st. armstöd
- 1 st. nackstöd (gäller Cecilia Ear)

Ta bort allt packmaterial i form av plast, kartong och band från stolen och försäkra er om att beställda delar finns med i leveransen.




Varning! Använd inga vassa föremål när packmaterialet avlägsnas från stolen.



Varning! Var försiktig när stolen lyfts ur förpackningen, stolen är tung och kan orsaka personskada.

3. Installation

När ni får behandlingsstolen levererad är den inte klar att användas, utan måste monteras enligt denna instruktion.

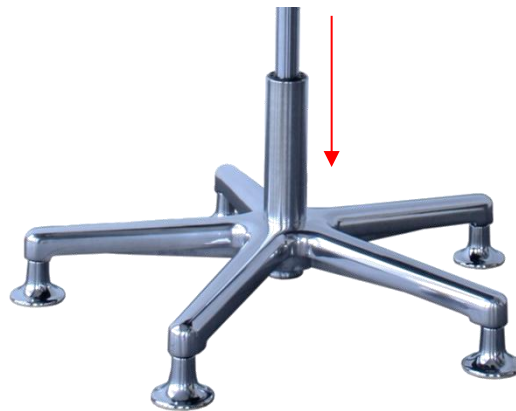

Ställ krysset på golvet och sätt gaskolvens tjocka del i krysset. Placera sitsen på gaskolvens smala del.



Trä ryggen på sitsens beslag. Om det är en Cecilia Ear ska nackstödet också träs på beslaget och låsas genom att skruva åt vingskruven medurs.

Cecilia Test



Cecilia Ear



Sätt armstöden i sina fästen:

- Cecilia Test, 120-00112-00
Sätt armen i fästet och spänn fast med låsspaken. Låsspaken kan justeras, se kapitel 4.1.
- Cecilia Ear, 120-00113-00
Sätt ner armstödet i fästet och spänn fast med vingskruven

Behandlingsstolen har fem glidknappar i standardutförande, för stabilitet. Olika typer av hjul finns som tillbehör, se kapitel 7.

Underredet är designat i en robustkonstruktion för att garantera hög stabilitet och lång livslängd.



Varning! Stolarna ska inte användas för persontransport.

4. Att använda Cecilai stolen



- ① Sits
- ② Ryggstöd
- ③ Gaskolv
- ④ Kryss
- ⑤ Provtagningsarmstöd
- ⑥ Armstöd
- ⑦ Nackstöd
- ⑧ Arm


Förutom olika hjul- och gaskolvstyper så har inte behandlingsstolarna några tillbehör tillgängliga. Se kapitel 7.

Se kapitel 9 för teknisk specifikation.

4.1 Att ställa in armstöden

Cecilia Test, 120-00112-00 är utrustad med provtagningsarmstöd. Lossa kullleden genom att vrida låsspaken, som sitter undertill. När leden är lossad kan armstödet enkelt justeras till valfri position.

Låsspakens arm kan justeras genom att fatta tag i låsspakens arm och trycka in centrum. Vrid sedan armen till önskad position och släpp

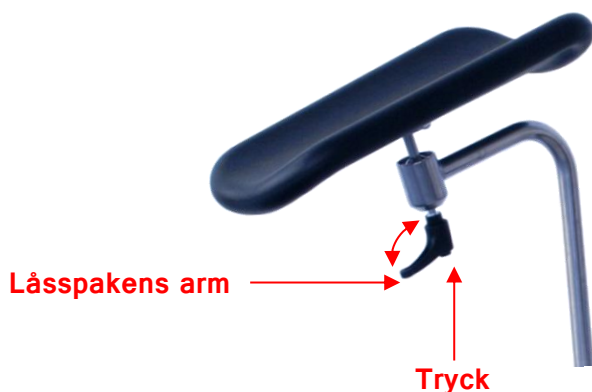

Cecilia Ear, 120-00113-00, är utrustad med vadderade armstöd. Dessa går att justera i höjdlid. Lossa vingskruven baktill, justera och lås med vingskruven vid önskat läge.

4.2 Ställa in rätt sittposition

Stolen är ställbar i höjdlid med hjälp av handreglage. Stolen är utrustad med ett en hands grepp för att justera sits och ryggstöd.



4.3 Att justera höjd på stolen

Under sitsen finns en spak för höjdregering. För att sänka sitsen, sätt dig på stolen och för spaken uppåt mot sitsen. Släpp när önskad höjd uppnåtts. För att höja sitsen, res dig från stolen, för spaken uppåt mot sitsen och släpp när önskad höjd uppnåtts.

4.4 Att justera djup på ryggstödet

Justeringshandtaget är placerat strax under sitsen på höger sida av stolen. Justeringarna bör ske sittandes i stolen. Vrid handtaget

motsols för att släppa på sätet och ryggstödet. Justera sitsen och ryggstödet till en komfortabel position, innan justeringen låses genom att vrida handtaget medsols.



Stolen bör inte användas av personer med vikt över 120 kg.

4.5 Att justera ryggstödet höjd



Ryggstödet höjdjusteringsanordning är placerad på ryggstödet stång, på baksidan av stolen. Justera höjden genom att skjuta låsklämman åt vänster, framifrån sett. Ryggstödet kan nu justeras för hand till en passande position. Ryggstödet position låses när låsklämman släpps.

4.6 Att justera nackstödet position

Cecilia Ear är utrustad med nackstöd. Detta går att ställa i höjd och djupled.



För att ställa in höjden: Lossa på vingskruven, som är placerad på baksidan av nackstödet stång, genom att vrida den moturs. Ställ in rätt höjd och lås genom att skruva åt vingskruven medurs.

För att ställa in djupet: Lossa på låsspaken som är lokaliserad vid nackstödsstångens botten, genom att vrida den moturs. Ställ in önskat djup och lås genom att vrida spaken medurs.

5. Rengöring och underhåll

5.1 Patientnära delar

Stolen används av patienten. Således är *dynor, armstöd, nackstöd, underrede* och *hjul/glidknappar* patientnära.

5.2 Periodisk rengöring

Allmän rengöring av stolen ska göras efter behov dock minst en gång i månaden. Utsatta delar bör rengöras efter varje användning. Det är dock viktigt att följa sjukhusets/mottagningens rengöringsföreskrifter och rutiner.

Rengöringsmedel

Detalj	Desinfektionsmedel	Information
Stoppning, hjul och ram Delar i metall och lackerade ytor	Vatten och tvål	Använd fuktig trasa. Om starkare medel används, skölj efteråt med vatten för att undvika uttorkning och sprickbildning

5.3 Desinficering

Rengör stolen med desinfektions/bakteriedödande medel enligt tillverkarens anvisningar. Följ sjukhusets/mottagningens protokoll för rengöring stolens yta.

Rekommenderad desinficering

Detalj	Rengöringsmedel	Information
Sits och andra delar i konstläder eller nylon.	Virkon (Inkluderar de flesta desinfektionsmedel utan alkohol).	1 % koncentration Följ tillverkarens anvisningar gällande koncentrationen. Medel med alkohol verkar uttorkande samt sprickbildande på sätes och ryggstöds materialet och ska inte användas.
Övriga delar	Noedischer Dekonta CCOTRADE RW (samt de flesta andra desinfektionsmedel) M-sprit Periform eller motsvarande	1-3 % koncentration 0,5 % koncentration Följ tillverkarens anvisningar Använd lätt fuktad trasa Följ tillverkarens anvisningar

6. Underhåll och service

Det är rekommenderat en årlig service av stolens funktioner för att bibehålla drift- och personsäkerhet. Service innefattar:

- Kontroll och justering av rörliga mekaniska delar och tillbehör
- Kontroll av dynor

Periodiskt underhåll

Varje månad	
Leder	Använd rostfri, standard instrumentspray
Låsspakar och justerskruvar	Använd rostfri, standard instrumentspray

Vänligen kontakta Rini eller er lokala återförsäljare för information om reservdelar för er produkt.

Produkten ska endast repareras av Rini eller ett av Rini auktoriserade service center eller ingenjör. Produkter under garanti ska alltid sändas till ett av Rini auktoriserade service center



Varning! Reparationer och modifieringar som utförs vid sidan om Rini's auktoriserade service kan medföra bristande funktion och ogiltig garanti.

7. Tillbehör

Här följer en lista över tillbehör till Rini behandlingsstol. Det är inte tillåtet att använda några andra tillbehör än de som beskrivs i listan.

Tillbehörslista

Produktkod	Benämning	Standard val	Option	Antal
140-00184-00	Klädsel annan typ än standard		X	1
140-00122-00	Hjul lätttrullande		X	5
140-00122-01	Hjul trögrullande		X	5
140-00122-02	Hjul, bromsar vid belastning		X	5
140-00123-00	Glidknapp	X		5
140-00124-00	Gaskolv låg		X	1
140-00124-01	Gaskolv mellan	X		1
140-00124-02	Gaskolv hög		X	1
140-00182-00	Fotstöd		X	1

7.1 Hjul

Behandlingsstolen kan utrustas med fem hjul istället för glidknappar.

- **Hjul lättrollande**
Dessa hjul har låg friktion och rullar lätt med och utan belastning
- **Hjul trögrullande**
Dessa hjul har hög friktion och rullar trögt med och utan belastning
- **Hjul, bromsar vid belastning**
Dessa hjul är lättrollande när de inte belastas. De låser automatiskt när stolen utsätts för belastning, till exempel när man sätter sig.

Hjulen trycks ner i de hål i krysset som är avsedda för att hålla hjul.



7.2 Gaskolv


Till behandlingsstolen finns tre olika gaskolvar med olika höjdintervall; låg, mellan och hög. I standardutförande levereras stolen med en gaskolv mellan.



För att byta en gaskolv behövs en gummi-/plastklubba.

1. Vänd stolen upp och ner och håll den någon centimeter ovanför underlaget
2. Lyft upp stolen i gaskolven och slå lätt med klubban mot metallunderredet på sitsen


3. Håll sedan stolen i krysset och slå mot gaskolven från undersidan av krysset, så att gaskolven lossnar från krysset

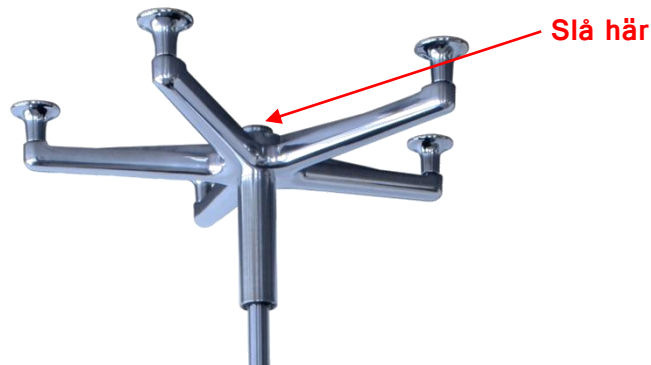

4. Ställ krysset på golvet och sätt gaskolvens tjocka del i krysset
5. Sätt sitsen på gaskolvens smala del

7.3 Fotstöd

1. Lossa sitsen från gaskolven med en gummi-/plastklubba, se kapitel 7.2, punkt 1 och 2.

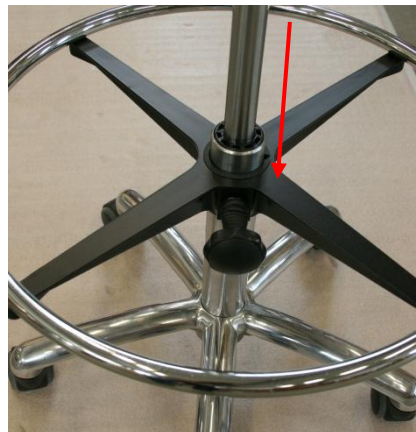

2. Trä på fotstödet på gaskolven



3. Skruva åt fotstödet med vredet, så att stödet inte trycks ner vid belastning

8. Säkerhet

Behandlingsstolen ska endast användas för dess avsedda bruk som är beskrivet i denna handledning. Felaktig användning och avsteg från säkerhetsanvisningarna kan leda till skada på person eller produkt. Denna handledning ska alltid finnas tillgänglig i anslutning till behandlingsstolen.

Nödvändig kunskap om behandlingsstolen krävs innan användning. Denna handledning måste läsas igenom innan utrustningen tas i bruk.

Inga andra tillbehör än de som anges i denna användarhandledning får användas.

Vänligen observera varningsskyltarna på produkten.



Varningssymbolen används när det föreligger risk för allvarlig skada för patient, personal eller system.

9. Teknisk specifikation

Behandlingsstol 120-00112-00 & 120-00113-00	
Dimensioner	b x h (mm)
Ryggstöd	380 x 230
Sits	460 x 420
Nackstöd	260 x 130
Total bredd	530mm
Total längd	580mm
Sitshöjd	450-590mm
Vikt	20 kg
Maximal belastning	200 kg
Säker arbetsbelastning	120 kg
Arbetsmiljö	
Temperaturintervall	+5°C till +40 °C
Relativ luftfuktighet	20% till 90% vid 30°C
Atmosfäriskt tryck	700 till 1060 hPa

Transport och förvaring

Temperatur	
Relativ fuktighet	-10 ° C till +50 ° C
Atmosfäriskt tryck	20 % till 90 % vid 30 ° C
	700 till 1060 hPa

Lagerförhållanden

Temperatur	-10 ° C till +50 ° C
Relativ fuktighet	20 % till 90 % vid 30 ° C
Atmosfäriskt tryck	700 till 1060 hPa

9.1 Destruktion och återvinning

Rini sadelstolar är i huvudsak tillverkade av miljömässigt återvinningsbara material. I huvudsak består produkterna av stål, rostfritt stål, aluminium, PVC och andra plaster. Rini rekommenderar att materialen sorteras och återvinns i så stor utsträckning som är möjlig i samband med destruktion av produkten.

10. Garanti

I enlighet med Rini's allmänna villkor är garantin på produkterna ett år från inköpsdatum.



Rini Ergoteknik AB Fågelsångsvägen 3B
SE-186 42 Vallentuna Sweden
Phone 08-594 77170 Fax 08-929279
info@rini.se www.rini.se